

Anlage 1

Blutprobeentnahme beim Wildschwein

Gebrauchsanweisung Kabevette® Schweißentnahmesystem bei Schwarzwild

Grund: Verschmutzung und Verunreinigung der Schweißproben soll vermieden werden, da die Proben sonst nicht auswertbar sind.

Blutentnahmesystem



Enthalten im Set:

- ✓ rote Kabevette® mit weißer Verschlusskappe (EDTA)
- ✓ Versandhülle
- ✓ Einsendeschein



- Entfernen der Verschlusskappe
(#Wichtig: Kappe nicht wegschmeißen!)

- Herzkammer oder ein geschlossenes Gefäß eröffnen und das Blut langsam aufziehen



- Jetzt die Kolbenstange abbrechen, die Verschlusskappe aufsetzen, die Barcodedublette abziehen und das Blutröhrchen in die Versandröhre stecken



- Barcodedublette auf den Untersuchungsantrag kleben und diesen vollständig ausfüllen

Wichtig:
Angaben zur Herkunft der Probe